

Chuẩn bị phục hình trực tiếp và gián tiếp

Khuyến cáo sử dụng để cao su cho tất cả các phục hồi trực tiếp và các chỉ định khác khi có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Bước 1 Chọn kỹ thuật từ A-C



Kỹ thuật A



Kỹ thuật B



Kỹ thuật C

Sản phẩm nổi bật
Select HV® Etch

KỸ THUẬT TỰ ETCHING:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vòi xịt nước. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (không làm khô quá mức).

KỸ THUẬT ETCHING TOÀN PHẦN:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vòi xịt nước. Acid Etch men răng và ngà răng bằng etching trong 15 giây. Rửa sạch kỹ lưỡng. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (để lại bề mặt xoang trám ẩm ướt).

KỸ THUẬT ETCHING CHỌN LỌC:

Chuẩn bị xoang trám. Rửa sạch kỹ lưỡng bằng vòi xịt nước. Bơm Etching lên men răng đã mài và chưa mài. Etching tại chỗ trong 15 giây. Sử dụng hút nước mạnh để loại bỏ acid. Rửa sạch kỹ lưỡng. Sử dụng viên bóng thấm hoặc hút nước mạnh trong 1-2 giây để loại bỏ nước thừa (không làm khô quá mức).

Bước 2



Nhỏ 1 lượng bằng nhau của UNIVERSAL PRIMER Phần A & B (tỷ lệ 1:1) vào một khay trộn sạch. Sử dụng cọ, trộn chất kết dính trong 5 giây. Bôi hai lớp UNIVERSAL PRIMER riêng biệt, thoa trên bề mặt răng bằng cọ micro-brush trong 10-15 giây mỗi lớp. Không chiếu đèn quang trùng hợp giữa các lớp.

Bước 3



Làm bay hơi dung môi thừa bằng cách thổi khô bằng vòi xịt khí trong ít nhất 10 giây; không được có sự di chuyển rõ ràng của chất kết dính. Bề mặt phải có vẻ ngoài bóng đều; nếu không, bôi thêm một lớp UNIVERSAL PRIMER và thổi khô.

Bước 4



Phục hồi trực tiếp: Quang trùng hợp trong 10 giây.
Phục hồi gián tiếp: Không yêu cầu quang trùng hợp. Tiến hành gắn phục hình.

Sản Phẩm Nổi Bật

SELECT HV ETCH

SELECT HV ETCH của BISCO là acid Phosphoric 35% có độ nhớt cao, được thiết kế cho kỹ thuật "Etching chọn lọc" hoặc "lai" - Etching bờ men mà không Etching ngà răng. Nó cũng có thể được sử dụng cho các quy trình phục hồi Etching toàn phần thông thường. SELECT HV ETCH nhằm tối ưu hóa thao tác và sự chính xác trong điều trị.

- Độ nhớt cao, lý tưởng cho việc Etching men răng.
- Có sẵn trong ống tiêm lớn tiện lợi.
- Dễ dàng rửa sạch mà không để lại cặn.

SELECT HV ETCH có BAC không có sẵn ở tất cả các quốc gia. Vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương của bạn để biết tình trạng sản phẩm.

