

Gắn dán Veneer bắt đầu với CHOICE™ 2



Rx Only





CHOICE 2 là một loại xi măng gắn quang trùng hợp hỗ trợ gắn các veneer sứ và composite. CHOICE 2 thể hiện sự ổn định màu sắc, một yếu tố quan trọng trong việc gắn veneer thẩm mỹ. Dạng paste quang trùng hợp cho phép các Bác sỹ nha khoa duy trì sự kiểm soát hoàn toàn trong quá trình thử và gắn veneer.

- Lựa chọn đa dạng theo bảng màu VITA®, mô phỏng màu răng tự nhiên.
- Các ống dạng kem thử có màu tương ứng giúp xác định việc lựa chọn màu sắc trước khi gắn (xi măng hóa).

Choice 2, lựa chọn lý tưởng với màu sắc ổn định và veneer siêu bền.

Sản phẩm ổn định màu sắc

Các màu của CHOICE 2 sẽ không thay đổi theo thời gian, một vấn đề thường gặp ở các vật liệu gắn dán veneer khác (Hình 1).

- Thể hiện sự ổn định màu sắc và tính thẩm mỹ
- Vật liệu ổn định màu sắc đầu tiên có mặt trên thị trường


Đặc tính vật lý tuyệt vời

CHOICE 2 được thiết kế đặc biệt chú trọng đến các đặc tính vật lý (Hình 2).

- Xi măng resin có hàm lượng hạt mịn cao giúp tăng cường độ bền tổng thể của phục hình.
- Độ dày lát mỏng lý tưởng đảm bảo sự khít sát hoàn hảo.


Thử nghiệm được thực hiện bởi Đại học Texas tại San Antonio bởi Tiến sĩ Nasser Barghi cho thấy các đặc tính vật lý vượt trội của CHOICE 2.

Độ ổn định màu của năm loại xi măng gắn Resin $\Delta E < 3$ không thể phát hiện bằng mắt thường

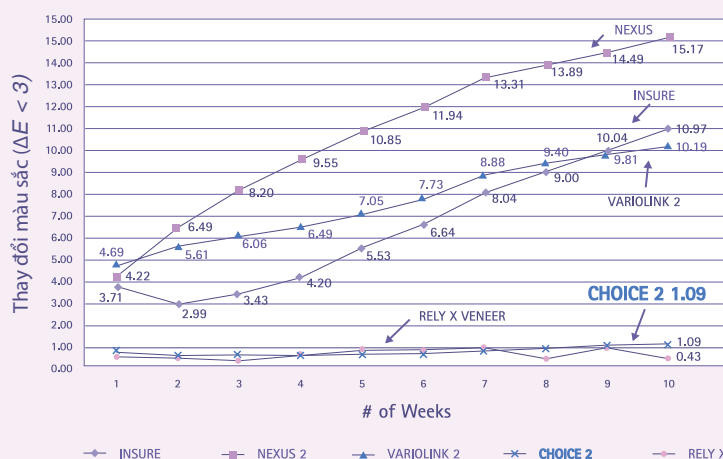

Hình 1 Một nghiên cứu mô phỏng quá trình lão hóa tự nhiên nhanh đã được thực hiện để so sánh năm loại xi măng gắn dán nổi tiếng. Các phép đo Delta E (ΔE) đã được so sánh để xác định mức độ thay đổi màu. Giá trị ΔE cho CHOICE 2 là 1.2. Bất kỳ giá trị ΔE nào nhỏ hơn 3 đều không thể phát hiện bằng mắt thường.

Thử nghiệm độ cứng Rockwell

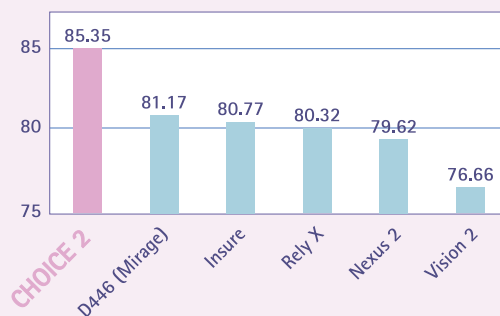

Hình 2 Thử nghiệm độ cứng Rockwell đã được tiến hành để xác định độ bền nén. CHOICE 2 cho thấy độ cứng vượt trội, cho thấy độ bền nén cao, dẫn đến việc đặt veneer giảm thiểu nguy cơ gãy vỡ.

Hệ thống Choice 2 bao gồm mọi thứ cần thiết để đảm bảo việc gắn veneer thành công:

Việc chuẩn bị veneer đúng cách là yếu tố then chốt để đạt được sự gắn kết tối ưu. Chuẩn bị veneer đòi hỏi phải thực hiện etching đúng cách, bôi silane, một lớp mỏng resin bonding và sử dụng xi măng gắn veneer CHOICE 2.



Dentistry courtesy of Wanderley Jr., DDS,
MS, Brazil, wanderleyjr@bs2.com.br

Chất Etching ACID PORCELAIN 9.5%

- Vật liệu dạng gel cho phép đặt vị trí chính xác, bao phủ hoàn toàn bề mặt veneer và kiểm soát tốt hơn để đảm bảo sự gắn kết tối ưu.

BIS-SILANE™

- Bảo vệ veneer khỏi nhiễm bẩn và tăng cường đáng kể độ bền dán tổng thể giữa veneer và răng.
- Silane hai thành phần đảm bảo vật liệu luôn sạch, mang lại hiệu quả tối ưu.
- Sản phẩm gốc ethanol ít bay hơi hơn nhiều so với các sản phẩm cạnh tranh, đảm bảo hiệu suất tốt nhất có thể.

RESIN BONDING CHO PORCELAIN

- Một loại resin dán kỵ nước, không chứa HEMA, giúp đẩy lùi nước và NGĂN CHẶN SỰ THAY ĐỔI MÀU SẮC.
- Đóng vai trò là resin làm ướt, giúp chất gắn (xi măng) có thể lan đều trên toàn bộ bề mặt veneer thành một lớp rất mỏng.

ALL-BOND UNIVERSAL®


- Chỉ cần 2 lớp, đảm bảo độ dày lớp cement đồng đều và hợp lý.
- Công thức kỵ nước (thân thiện với resin) giúp cải thiện độ bền dán bằng cách tối ưu hóa độ dán kín

PASTE THỬ MÀU CHOICE 2 CŨNG CÓ SẴN


- Có sẵn (bán riêng) để hỗ trợ xác định màu sắc phù hợp nhất nhằm đạt được mức độ thẩm mỹ cao nhất.
- Được thiết kế để khớp với màu xi măng CHOICE 2 tương ứng sau khi trùng hợp.




KỸ THUẬT CHUẨN BỊ VÀ GẮN PHỤC HÌNH VENEER SỨ*

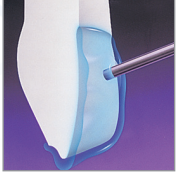

Làm sạch răng đã sửa soạn, rửa, làm khô và sau đó etching.

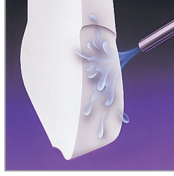


Rửa sạch.

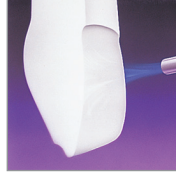


Thổi khô bằng khí. Để lại bề mặt hơi ẩm có thể nhìn thấy.




Bôi ALL-BOND UNIVERSAL.

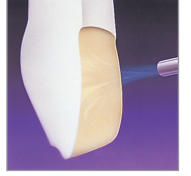

Thổi khô bằng khí.

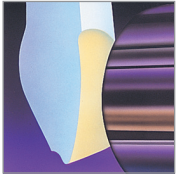


Quang trùng hợp.

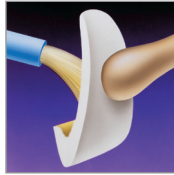


Bôi RESIN BONDING CHOICE 2 CHO PORCELAIN.



Lót xi măng CHOICE 2 vào mặt trong veneer.

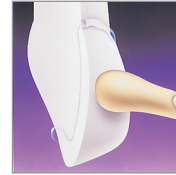

Dán theo cặp, nhẹ nhàng dán một lớp veneer mỗi lần.

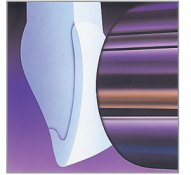

Quang trùng hợp.

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

C-39010K

CHOICE 2 STARTER KIT với ALL-BOND UNIVERSAL

- 2 Ống bơm CHOICE 2 Màu: TRONG SUỐT (4,5g mỗi ống)
- 1 Ống bơm CHOICE 2 Màu: A1 (4,5g)
- 1 Ống bơm CHOICE 2 Màu: B1 (4,5g),
- 1 Ống bơm CHOICE 2 Màu: TRẮNG SÁNG SỮA (4,5g)
- 1 Ống bơm UNI-ETCH® với BAC (5g)
- 1 Ống bơm Chất khắc axit Porcelain 9,5% (5g)
- 1 Chai mỗi phần Bis-Silane™ A & B (6ml mỗi chai)
- 1 Chai ALL-BOND UNIVERSAL® (6ml)
- 1 Chai Nhựa dán Porcelain (6ml)
- Phụ kiện, Hướng dẫn



ỐNG BƠM LÀM ĐẦY CHOICE 2

1 Ống BƠM (4,5g mỗi ống)

TRONG SUỐT, ĐỤC TOÀN PHẦN, ĐỤC TRẮNG SỮA và TRẮNG SÁNG SỮA

Ống bơm thử màu CHOICE 2 tương ứng được bán riêng.

