

QUY TRÌNH GẮN DÁN PHỤC HÌNH ZIRCONIA INLAY - ONLAY - VENEER

CHUẨN BỊ TRÊN PHỤC HÌNH

BƯỚC 1A

- ✓ Kiểm tra thử phục hình sau cùng trên cùi răng để đảm bảo khít sát và đúng vị trí.
- ✓ Làm sạch bề mặt phục hình.

BƯỚC 2A

- ✓ Bơm **ZirClean** lên trên bề mặt phục hình để loại bỏ hoàn toàn các thành phần nhiễm bẩn còn lại, để yên trong 20s, rồi rửa sạch với nước, sau đó thổi khô.

BƯỚC 3A

- ✓ Bôi 1 đến 2 lớp **Z-PRIME™ Plus** lên trên bề mặt cần gắn dán để giúp gia tăng tối đa độ liên kết khi gắn, để yên trong 30s, thổi khô 3-5s.

DUO-LINK Cement Resin lưỡng trùng hợp



CHUẨN BỊ TRÊN RĂNG

BƯỚC 1B

- ✓ Kiểm tra, làm sạch xoang hoặc bề mặt răng

BƯỚC 2B

- ✓ Etching xoang hoặc bề mặt răng bằng axit H_3PO_4 35% trong # 15s.
- ✓ Sau đó rửa sạch và thổi nhẹ để loại bỏ nước (không làm quá khô).

BƯỚC 3B

- ✓ Bôi 2 lớp keo **ALL-BOND UNIVERSAL** riêng biệt lên bề mặt răng bằng cây cọ nhỏ, để 10s - 15s cho mỗi lớp keo (không được chiếu đèn giữa 2 lớp này)
- ✓ Làm bay hơi dung môi thừa bằng đầu xịt, ít nhất trong 10s để có lớp keo mỏng và đồng đều
- ✓ Chiếu đèn 10s để lớp keo đông cứng hoàn toàn

BƯỚC 4

- ✓ Chọn màu **Duo-Link** phù hợp (Universal hoặc Milky White)
- ✓ Sử dụng đầu tự trộn để bơm Duo-Link vào bề mặt phục hình

zolid gen-x



zolid bion



Lưu ý:

- Sửa soạn phục hình nên tạo cho PH có tính lưu cơ học vững ổn.
- Nên làm sạch thổi cát để tăng độ vi lưu.
- Phải sử dụng đầu trộn, không trộn tay.
- Nên đặt đế cao su.
- Sử dụng đèn có công suất cao như Curing Pen.

BƯỚC 6

- ✓ Tiếp tục chiếu đèn nếu phục hình mỏng ánh sáng xuyên qua được, hoặc để cho cement tự trùng hợp đông cứng hoàn toàn.

BƯỚC 5

- ✓ Gắn phục hình khít sát đúng vị trí trên răng, lấy đi tất cả cement dư. Để hỗ trợ lấy cement dư nhanh chóng, cần chiếu đèn đường hoàn tất trong 2-3 giây cho cement đông đặc.

Không giới hạn - Vượt mọi rào cản

DUO-LINK UNIVERSAL™



5 Duo-Link Universal™

lý do nên dùng ngay hôm nay

Thông dụng

1 cho tất cả các kỹ thuật trám bít thông thường và lý tưởng cho cả phục hình CAD/CAM.

Độ cản quang cao

2 dễ dàng xác định qua phim Xquang giúp chẩn đoán nhanh chóng và hiệu quả.

Cực kỳ dễ làm sạch

3 với công thức riêng biệt giúp nhanh chóng và dễ dàng lấy đi cement dư.

Màu sắc thẩm mỹ

4 màu sắc đa dạng có thể sử dụng cho hầu hết các phục hình, trong đó màu Milky White (màu trắng sữa) có thể dùng để che màu cho một số răng tối màu.

Lớp cement gắn mỏng

5 đạt được độ khít sát hoàn hảo cho bất kỳ phục hình nào.



DUO-LINK
UNIVERSAL™
Cement gắn resin

Sức bền dán vượt tầm thế giới!

DUO-LINK UNIVERSAL cement nhựa với công thức đặc biệt để gắn dán trên tất cả các phục hình gián tiếp. Nó có cả 2 màu thẩm mỹ: Universal (màu thông dụng) và Milky White (màu trắng sữa).

DUO-LINK UNIVERSAL: sự mong đợi về một loại cement gắn được thiết kế sao cho tương thích với tất cả các loại vật liệu nha khoa, bao gồm tất cả các chất gắn dán của BISCO.

Thông dụng - Dành cho tất cả nhu cầu gắn, dán*

Cầu, mão (phục hình cố định), inlay, onlay, chốt kim loại, chốt composite, sứ, zirconia, alumina và phục hình CAD/CAM...

Cực kỳ dễ làm sạch

Với công thức giúp nhanh chóng và dễ dàng lấy đi phần cement dư.

Độ cản quang cao

Dễ dàng xác định trên phim Xquang giúp chuẩn đoán nhanh chóng và hiệu quả.

Sự chuyển đổi trạng thái ở mức cao

Sự chuyển đổi trạng thái ở mức cao cho cả loại quang trùng hợp và tự trùng hợp, giúp cho phục hình được gắn bền chặt và lâu dài.

Dễ sử dụng

Tự trộn, ống bơm kép giúp vật liệu được trộn đều ngay tức thì.

Phục hình CAD/CAM

Chỉ định cho tất cả các phục hình tại ghế và trong labo.


Màu cement mới

Màu Universal (thông dụng) có độ trong mờ với độ dày lớp cement mỏng.

Màu Milky White (trắng sữa) có độ cản quang nhiều hơn và có thể được dùng để che các cùi răng tối màu.

Độ bền độ bền dán với lực nứt gãy trên ngà (MPa)

Độ bền dán thông thường khi sử dụng phương pháp Ultradent trên ngà răng

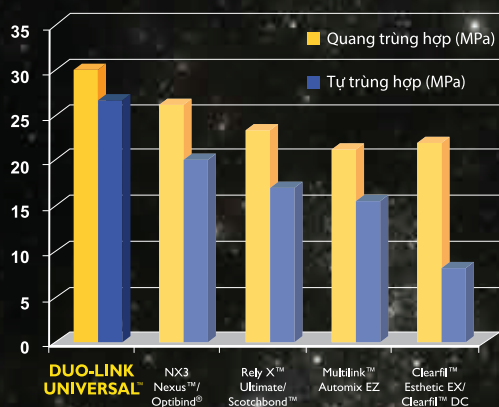

DUO-LINK UNIVERSAL

độ bền dán cao hơn các cement khác.

Dữ liệu từ BISCO, Inc.

Đăng ký tên thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu.

Courtesy of Adamo Notarantonio, DDS, AAACD, FICOI




DUO-LINK UNIVERSAL cement được cho vào bên trong mão răng.



Gắn mão răng xuống đúng vị trí.



Phục hình sau khi gắn.

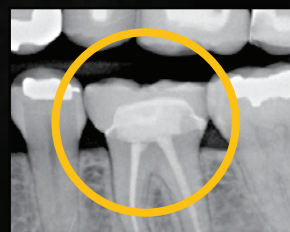

Dễ dàng xác định được trên phim X quang.

* Được khuyến nghị sử dụng BISCO's CHOICE™ 2 cho gắn dán veneer.