

Keo dán tự xoi mòn với chỉ một chai

KEO DÁN PALFIQUE



TẠO LIÊN KẾT DÁN THẨM MỸ VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Hoạt chất monomer 3D SR, ngay từ đầu đã được phát triển bởi công ty Tokuyama Dental, giúp tạo ra lớp liên kết dán toàn diện và đồng nhất. PALFIQUE Bond sử dụng công nghệ monomer 3D SR (Self Reinforcing) giúp mang lại kết quả dán dính mạnh mẽ và bền chắc, đồng thời ít nhạy cảm khi thao tác và ít nhạy cảm sau điều trị. Đây là bước tiến của hệ thống dán tự xoi mòn chỉ với một thành phần, sử dụng monomer 3D SR. PALFIQUE Bond mang đến cho các nhà điều trị liên kết dán thẩm mỹ và đáng tin cậy.

Đặc điểm

PALFIQUE Bond có tính năng sử dụng tốt hơn, với độ bền dán cao tương tự như lực liên kết TOKUYAMA nguyên thủy ban đầu

- Thời gian bôi keo ngắn trong 10 giây
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng (0-25°C) trong vòng đến 2 năm
- Làm khô ngắn trong 5 giây với thổi khô nhẹ
- Thời gian làm việc dưới miếng chắn ánh sáng đèn trong 5 phút

KEO DÁN PALFIQUE

Các bước thực hiện đơn giản



Chuẩn bị



Bôi keo dán PALFIQUE



Đặt yên trong 10 giây, sau đó thổi khô bằng xít hơi nhẹ trong 5 giây




Trùng hợp bằng ánh sáng đèn trong 10 giây.



Miếng trám sau cùng
Ca lâm sàng thực hiện bởi
Bs. Kazunori Otani

Độ bền dán đảm bảo (Lực dán mạnh mẽ và bền chắc)

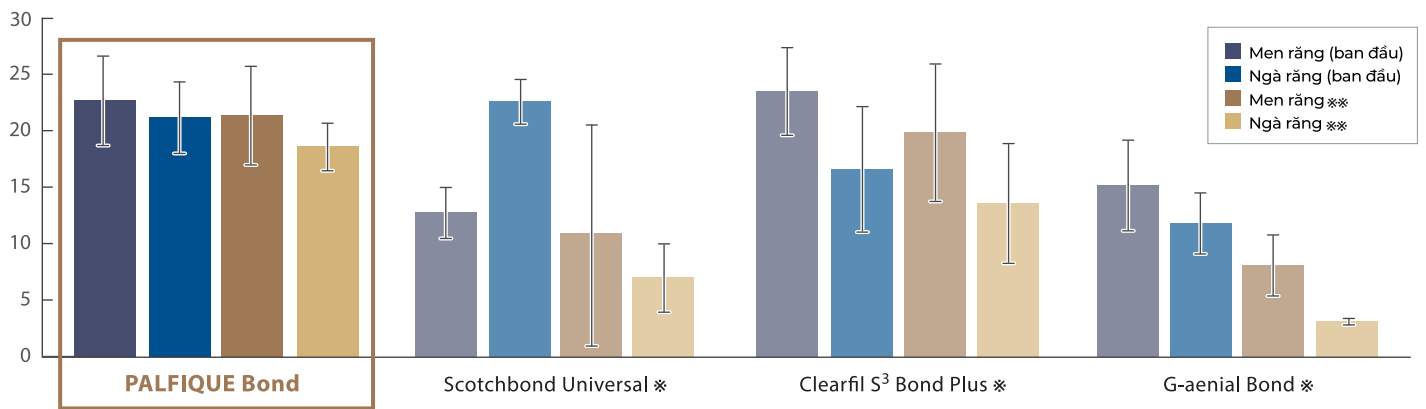



*** Dữ liệu nội bộ, R&D, tập đoàn Tokuyama Dental

** Sau 3.000 lần dùng chu kỳ thử nghiệm bằng nhiệt

* Không phải là thương hiệu đăng ký của tập đoàn Tokuyama Dental

Lớp liên kết dán đồng nhất, mỏng và chắc chắn

PALFIQUE Bond cung cấp một lớp liên kết dán đồng nhất, mỏng, chắc chắn và cho thấy khả năng tương thích tuyệt vời với xoang trám

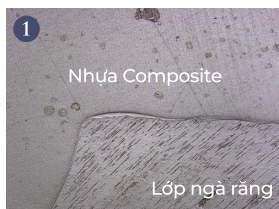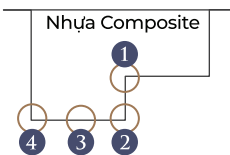

Các gói sản phẩm hiện có



Keo dán PALFIQUE **BỘ**

- Chai/5ml x 1
- Cọ lấy keo dán dùng một lần (cục nhỏ)
- khay đựng keo dán



Keo dán PALFIQUE **CHAI**

- Chai/5ml x 1