

Vật liệu đệm nền hàm và nối rộng nền hàm trực tiếp

Tokuyama **REBASE II**

Chính xác với sự thuận tiện
cho công việc điều trị tại phòng nha



Vật liệu đệm nền hàm và nối rộng bờ nền hàm trực tiếp

Tokuyama REBASE II



FAST



NORMAL




NỘI DUNG

BỘT NHỰA TOKUYAMA REBASE II (80g).....	1
DUNG DỊCH NƯỚC TRỘN TOKUYAMA REBASE II (50mL).....	1
KEO DÁN (15mL).....	1
Lý do lường (dành cho BỘT NHỰA TOKUYAMA REBASE II) 1	
Ống nhỏ giọt (dành cho DUNG DỊCH NƯỚC TRỘN TOKUYAMA REBASE II).....	1
Chén cao su (để trộn TOKUYAMA REBASE II BỘT và LỒNG).....	1
Bay đưa (để phết/ trải TOKUYAMA REBASE II lên hàm giả).....	1
Lý nhựa (để đựng KEO DÁN).....	2
Cọ (để quét KEO DÁN).....	2
CHẤT LÀM CỨNG NHỰA TOKUSO II.....	1
Muỗng/thìa (dành cho CHẤT LÀM CỨNG NHỰA TOKUSO II).....	1

ĐẶC ĐIỂM

- Thủ thuật thực hiện trong một lần hẹn
- Tiết kiệm chi phí labo & thời gian
- Vật liệu tự đông cứng trong miệng
- Giảm bớt tạo nhiệt & kích ứng hóa học
- Khít sát tuyệt vời
- Thời gian làm việc thích hợp
- Đánh bóng dễ dàng

THỜI GIAN THỰC HIỆN THỦ THUẬT

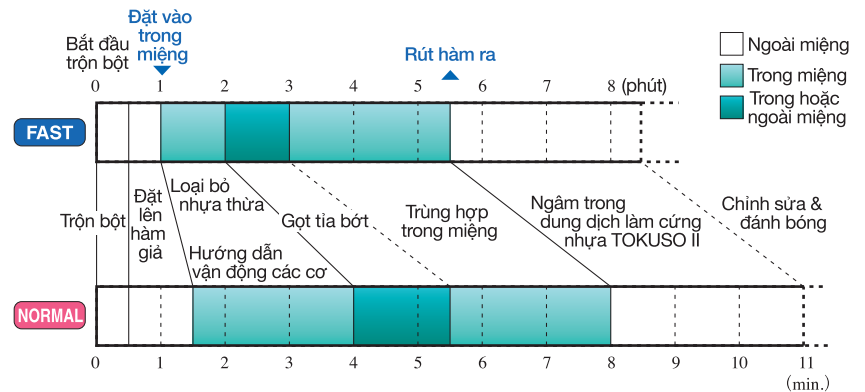

* Thời gian làm thủ thuật thay đổi tùy theo nhiệt độ phòng và tỷ lệ bột-dung dịch trộn

THỦ THUẬT CƠ BẢN



① Kiểm tra sự tương thích



② Mài bỏ bột bề mặt hàm giả



③ Bôi keo dán



④ Trải hỗn hợp nhựa lên nền hàm



⑤ Gắn hàm giả vào → Loại bỏ phần nhựa thừa



⑥ Hướng dẫn vận động các cơ




⑦ Lấy hàm ra



⑧ Ngâm trong dung dịch làm cứng nhựa TOKUSO II



⑨ Chỉnh sửa và đánh bóng

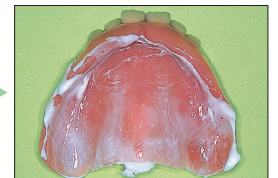

⑩ Kiểm tra lại sự khít sát