



VẬT LIỆU LẤY DẤU ALGinate
NHA KHOA [KHÔNG BỤI]

NEW ALGISTAR

Vật liệu lấy dấu thường quy trong thực hành lâm sàng.

Bạn đang tìm kiếm vật liệu lấy dấu dễ sử dụng?

Điều quan trọng nhất là vật liệu lấy dấu không chảy xuống họng và dễ dàng gỡ ra sau khi đông cứng.

Lấy dấu bằng NEW ALGISTAR cho kết quả dấu mẫu hàm mịn, đầy đủ chi tiết và dễ dàng sử dụng.

NEW ALGISTAR đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân.

Sử dụng bộ thìa và cốc đo chuyên dụng.

Thay đổi suy nghĩ của bạn về Alginate!



Không mùi

Dễ dùng

Lấy dấu chi tiết

Bột mịn, hầu như không bụi, dẻo dễ trộn. Tương thích với tất cả thạch cao đổ mẫu trên thị trường!

Đặc tính

1 Dễ hòa tan trong nước

NEW ALGISTAR dễ dàng ngâm và trộn trong nước

2 Trộn dễ dàng và nhanh hơn

NEW ALGISTAR dễ hòa tan trong nước, giúp việc trộn nhanh hơn. Ngoài ra, lực cần nhỏ hơn giúp việc trộn không cần nhiều sức, chỉ cần lực nhẹ.

3 Mềm mịn, không chảy nhão

NEW ALGISTAR trở nên dẻo sau khi trộn, không bị chảy nhão nên không cần trộn nhiều.

4 Gần như không mùi vị

NEW ALGISTAR gần như không có mùi vị. Dễ chịu với bệnh nhạy cảm với hương liệu.

5 Hạn chế bị dính răng

NEW ALGISTAR ít bị dính răng. Dễ dàng gỡ bỏ ra khỏi miệng sau khi đông kết và giúp bệnh nhân không cảm thấy khó chịu. Việc gỡ bỏ dễ dàng giúp phòng tránh sự biến dạng của khuôn dấu.

6 Hạn chế biến dạng

NEW ALGISTAR có độ đàn hồi tuyệt vời và bề mặt mịn, dễ gỡ ngay cả khi có vùng lẹm lớn.

7 Có thể sử dụng thiết bị trộn tự động

NEW ALGISTAR có thể được trộn thủ công và bằng thiết bị trộn tự động. Vậy nên không cần thêm chi phí cho vật liệu lấy dấu khác.



Sử dụng cho lấy dấu chung, lấy dấu sơ bộ

1 Giàn đều bột trước khi dùng và đo lường chính xác

2 Dùng thìa và cốc đo nước chuyên dụng cho chất lấy dấu NEW ALGISTAR

3 Trộn nhanh bằng máy trộn trong khoảng 30 giây. Khi sử dụng thiết bị trộn tự động, hãy làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất

※ Thời gian đông cứng thay đổi tùy theo nhiệt độ nước. Đặt 23°C làm nhiệt độ tiêu chuẩn.

4 Tiến hành lấy dấu

5 Sau khi rửa sạch khuôn dấu dưới dòng nước đang chảy, khử trùng nếu cần thiết.

6 Lau khô nước trên khuôn dấu, và đổ thạch cao càng sớm càng tốt. Nếu chưa đổ thạch cao ngay lúc đó, hãy bảo quản trong hộp giữ ẩm.

7 Dấu bỏ đi được phân loại vào rác thải y tế.

Có 3 loại theo thời gian hoạt động và cho mọi nhu cầu

	NHANH	BÌNH THƯỜNG	CHẬM
Tổng thời gian thao tác	1.5 phút	2 phút	2.5 phút
Màu	Xanh lá	Hồng thắm	Xanh lam



Nhanh



Bình thường



Chậm

NEW ALGISTAR

[Chất lấy dấu alginate Nha khoa]

Quy cách đóng gói thùng 10kg (túi nhôm 0.5kg x 20)

Thiết bị y tế được kiểm soát

- NEW ALGISTAR NHANH
- NEW ALGISTAR BÌNH THƯỜNG
- NEW ALGISTAR CHẬM

Phê duyệt số 219AABZX00188000
Phê duyệt số 219AABZX00189000
Phê duyệt số 219AABZX00190000

Chủ sở hữu giấy phép tiếp thị: SAN ESU GYPSUM CO., LTD
Giấy phép kinh doanh sản xuất số: 27B2X00022



URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

Dental sales division
Tokyo office
Osaka office
Fukuoka office



Nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam CÔNG TY TNHH NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG Văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 13D Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0909.595.081

Văn phòng Hà Nội

Địa chỉ: Số 4, Ngõ 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0989.463.345
Website: <https://www.thaibinhduongdental.com/>



Website