

TheraCem®

Cement Resin tự dán lưỡng trùng hợp

zolid gen-x



zolid bion

QUY TRÌNH GẮN DÁN PHỤC HÌNH ZIRCONIA TRÊN IMPLANT HOẶC CÙI RĂNG

01

Kiểm tra, làm sạch và thử phục hình sau cùng trên Abutment để đảm bảo khít sát và đúng vị trí.

02

Bơm ZirClean lên trên Abutment và bên trong lòng phục hình để loại bỏ hoàn toàn các thành phần nhiễm bẩn còn lại, để yên trong 20s, rửa sạch với nước, sau đó thổi làm khô.



03

Bôi thêm 1 đến 2 lớp Z-PRIME™Plus lên trên bề mặt Abutment và bên trong PH để giúp gia tăng độ liên kết khi gắn, để yên trong 30s, thổi khô 3-5s.



04

Tháo nắp đậy hoặc ống trộn cũ ống Theracem, bơm một lượng nhỏ lên giấy trộn để loại bỏ khí bên trong, gắn ống và khuấy trộn mới.

05

Nhấn pít-tông để tự trộn và bơm TheraCem vào mặt trong phục hình

06

Gắn phục hình khít sát đúng vị trí trên Abutment, lấy đi tất cả cement dư. Để hỗ trợ lấy cement dư nhanh chóng, cần chiếu đèn đường hoàn tất trong 2-3 giây cho cement đông đặc.

07

Tiếp tục chiếu đèn trong 20-30 giây, hoặc để cho cement tự trùng hợp đông cứng hoàn toàn.



Lưu ý:

Nên đặt đê cao su.

Phải sử dụng đầu trộn, không nên trộn tay.

Sử dụng Zir Clean và Z-Prime ở bước 2 và 3 để có được lực dán dính tối đa nếu cần!

ĐÂY CHÍNH LÀ SẢN PHẨM CHO TƯƠNG LAI

với "THỂ HỆ CEMENT KẾ TIẾP"

TheraCem®

Cement Resin lưỡng trùng hợp

TheraCem là cement resin tự dán lưỡng trùng hợp, phóng thích Canxi và Fluoride, được chỉ định gắn cho mão răng, cầu răng, inlay, onlay và chốt (các loại chốt kim loại/ không kim loại/ chốt sợi làm sẵn).

Đóng gói 1 ống kép

1 ống kép (8g), 15 đầu trộn và 15 đầu bơm trong miệng, sổ tay HDSD.
Màu Natural (tự nhiên).....D-46311P



5 lý do nên dùng TheraCem[®] ngay hôm nay

1

Phóng thích Fluoride và Calcium

các ion tiếp tục được phóng thích¹

2

Dán dính với Zirconia

có lực dán bền chặt với zirconia và hầu hết vật liệu làm sườn khác nhờ công nghệ 10-MDP

3

Dễ làm sạch

dễ dàng lấy đi cement thừa

4

Độ pH kiềm sau khi dán

chuyển đổi từ độ pH acid sang pH kiềm trong vài phút²

5

Độ cản quang cao

dễ dàng xác định trên phim X quang



1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Phosphat phóng thích Calcium & fluoride trở lại ở các cement resin. Dent Mater. 2016 (32S).e26.
2. Cement Resin tự dán mới với pH kiềm. Chen L, Gleave C, Suh B, J Dent Res96(A):#286, 2017

Hãy chào đón thế hệ mới nhất của dòng họ "Thera" Thế hệ cement

KẾ TIẾP

TheraCem là cement resin lưỡng trùng hợp, tự xoi mòn, phóng thích canxi và fluoride, được chỉ định gắn cho mão răng, cầu răng, inlay, onlay và chốt (các loại chốt kim loại / không kim loại/ chốt sợi làm sẵn).

Phóng thích Calcium và Fluoride

- Các ion tiếp tục được phóng thích¹.

Độ pH kiềm

- Chuyển đổi từ độ pH acid sang pH kiềm trong vài phút².

Dễ dàng làm sạch

- Công thức chuyên biệt cho phép lấy sạch cement dư nhanh chóng và dễ dàng.

Mức độ chuyển đổi cao

- Đảm bảo độ bền vật lý cao hơn.

Độ cản quang cao

- Dễ dàng xác định trên phim giúp chẩn đoán nhanh chóng và hiệu quả.

Dễ dàng sử dụng


- Ống kép tự trộn mang lại độ đặc đồng nhất để sử dụng ngay.

Tạo lực dán bền chắc với Zirconia


- Mang đến một lực dán mạnh mẽ lên Zirconia và hầu hết các bề mặt vật liệu mà không cần phải dùng Primer.



TheraCem tiếp tục phóng thích Fluoride và Calcium

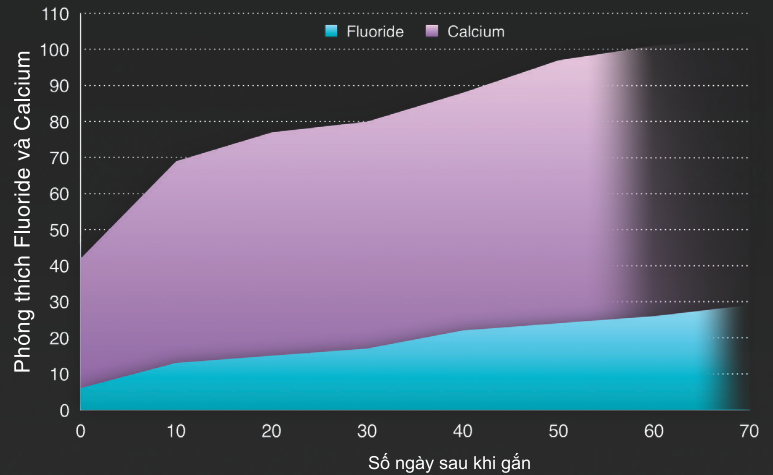


Thế hệ kế tiếp cho độ bền dán mạnh mẽ

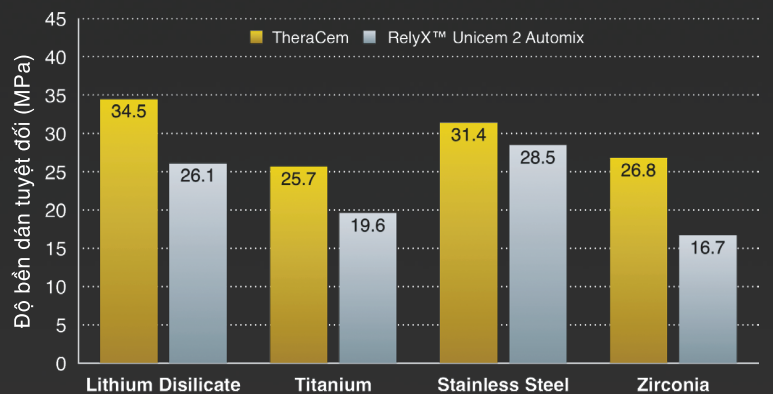

LƯU Ý: Lithium disilicate đã được xoi mòn với HF và lớp primer dùng cho sứ đã được quét lên. Các bề mặt Titan, thép không gỉ và zirconia được thổi cát. Phương pháp jig Ultradent.

Độ bền dán tuyệt đối trên Zirconia

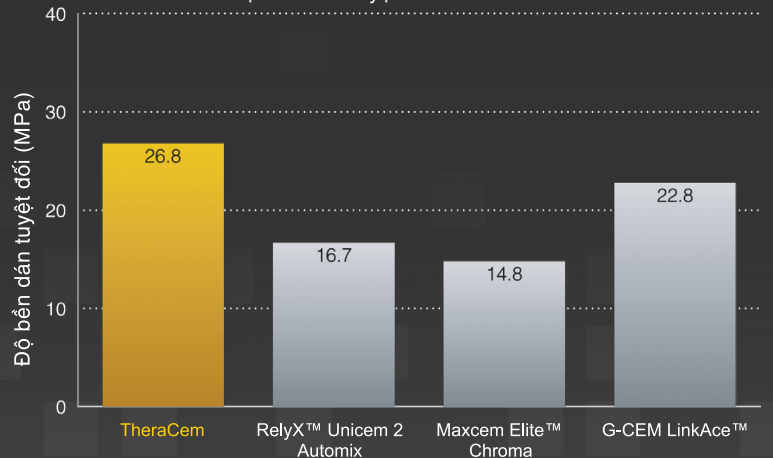

LƯU Ý: Bề mặt Zirconia được thổi cát. Phương pháp jig Ultradent.

Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của các công ty tương ứng

1. Gleave CM, Chen L, Suh BI. Phóng thích trở lại Calcium & fluoride ở các cement resin. Dent Mater. 2016 (32S):e26.

2. Cement Resin tự dán mới với pH kiềm. Chen L, Gleave C, Suh B, I DentRes96(A):#286, 2017. File dữ liệu từ BISCO, Inc.