



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY PHẪU THUẬT SIÊU ÂM PIEZOSURGERY TOUCH

1. MÁY BAO GỒM

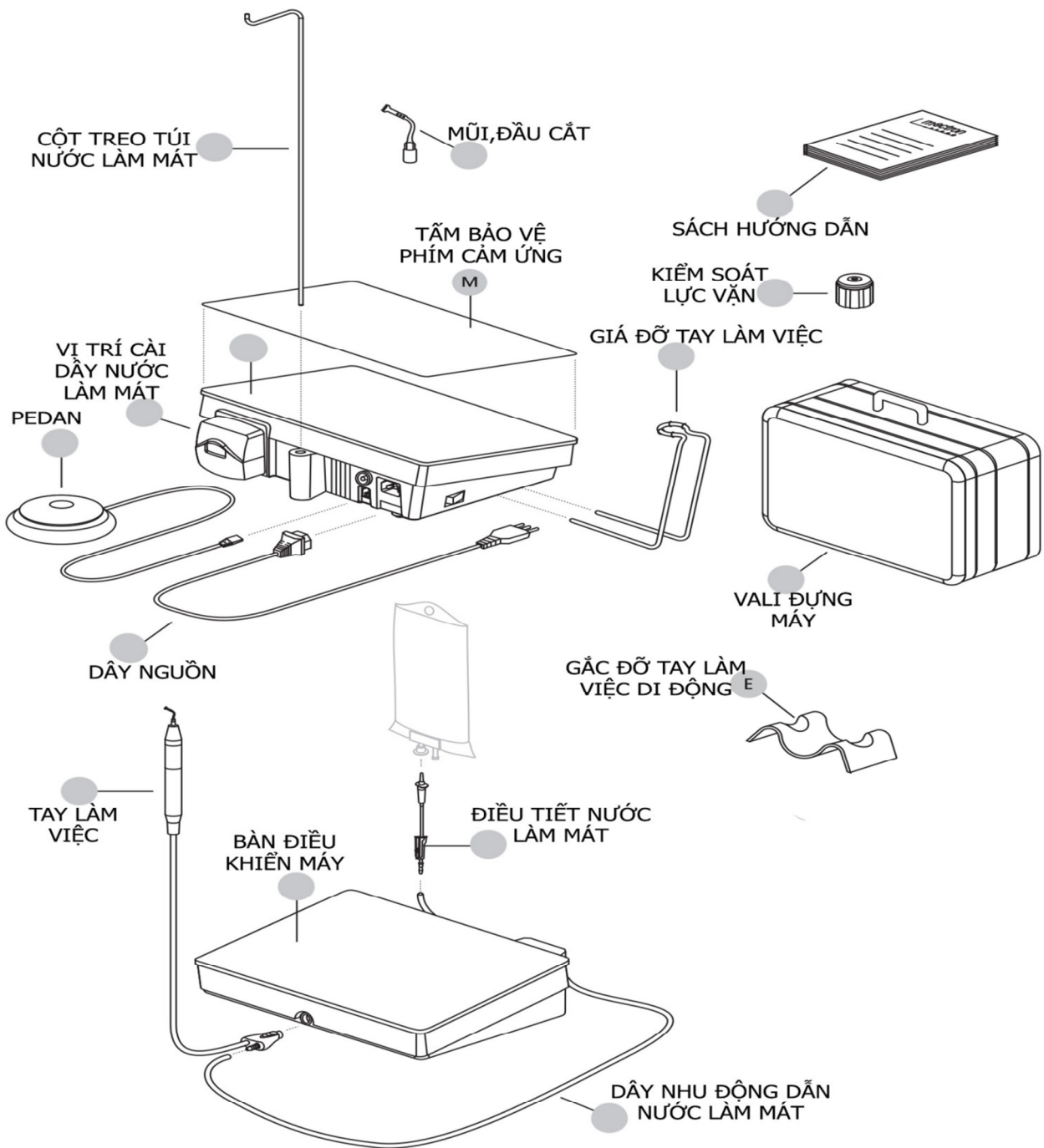

2. KẾT NỐI DÂY NHU ĐỘNG DẪN NƯỚC LÀM MÁT

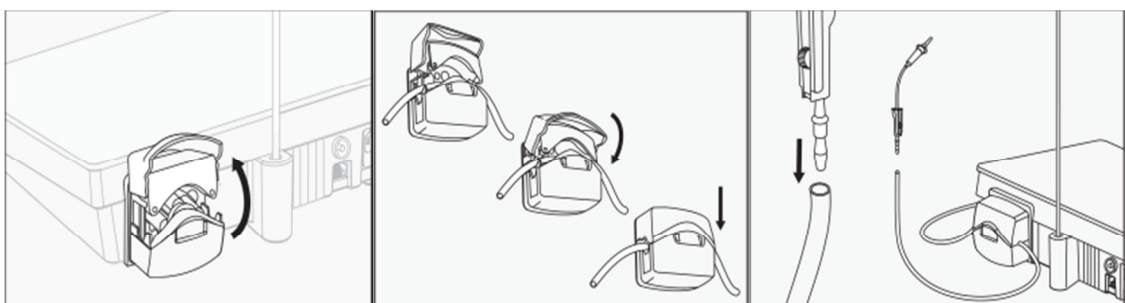

3. BẢNG ĐIỀU KHIỂN MÁY



4. BƠM / RỬA

Tích hợp phím Bơm/Rửa tùy theo chế độ sử dụng để máy chạy Bơm hoặc Rửa

Chức năng Bơm/ Pump có thể được sử dụng, khi bắt đầu điều trị để đẩy nước đến đầu Insert. Nhấn giữ phím cho đến khi nước từ túi làm mát truyền đến đầu lắp Insert

Chức năng Rửa /Flush cho phép thực hiện 1 chu trình cần thiết bằng nước tiết trùng. Chức năng này bắt buộc phải được thực hiện khi kết thúc sử dụng thiết bị.

Pha dung dịch khử trùng, sau đó cắm đầu được rút ra từ túi nước làm mát vào dung dịch tiết trùng đó. Nhấn và giữ phím Pump/Flush cho đến khi nước tiết trùng truyền hết qua ống dây dẫn đến đầu insert .

Kết thúc quá trình Bơm rửa khi trong dây dẫn và thiết bị không còn nước.

5. CHỌN MỨC NƯỚC

Điều chỉnh lượng nước ra đầu Insert bằng cách lựa chọn 1 trong 7 mức dung tích.

Mức độ 0 : Hoạt động của Bơm bị đóng không có nước chảy ra tại đầu Insert

Mức độ 1- 6 : Nước được Bơm ra với dung tích từ 8ml/phút đến 75ml/phút