

WL-clean / WL-cid

Bước 1



Rửa sạch và vô trùng bên ngoài bằng giấy thích hợp **CleanWipes/MinutenWipes**

Bước 2

Rửa sạch chất dơ không protein với **WL-clean**

- Cắm chuỗi thích hợp trên vòi xịt
- Cắm chuỗi vào dụng cụ
- Xịt 3 lần, mỗi lần 2 giây
- Lấy dụng cụ ra khỏi chuỗi và để



WL-clean
tác dụng trong 1 phút

Bước 3

Vô trùng và làm sạch với **WL-cid**

- Cắm chuỗi thích hợp trên vòi xịt
- Cắm chuỗi vào dụng cụ
- Xịt 3 lần, mỗi lần 3 giây
- Lấy dụng cụ ra khỏi chuỗi và để **WL-cid** tác dụng trong 2 phút



Bước 4

Làm khô với **WL-dry** hoặc **WL-Blow**

- Cắm chuỗi thích hợp trên bình xịt **WL-dry**/ súng khí nén
- Cắm chuỗi vào dụng cụ
- Xịt trong 3 giây
- Lấy chuỗi ra



Làm sạch và khử khuẩn tay khoan với WL- clean

Trước

Khi chưa làm sạch



Sau

Khi làm sạch với WL- clean



Hình ảnh thể hiện khả năng làm sạch (phóng đại x25 – x30)



KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VỚI ALPRO
An toàn & sạch sẽ hoàn toàn

